

Botonera Sense

Ref.: 002115



La botonera Sense es una **unidad inalámbrica con ocho resistentes botones de colores iluminados** que permiten trabajar de forma interactiva relaciones de causa-efecto con los elementos de la sala. Por ejemplo, cambiar el color del tubo de burbujas o de la fibra óptica, apagar un efecto o cambiar su modo de funcionamiento.

Además de permitir un control directo de cualquier efecto Sense, de forma individual o simultánea, la botonera integra una serie de **juegos de memoria y atención**. También es posible controlarla mediante el sonido, a través de palmadas, silbidos, golpes o instrumentos de percusión.

Se trata de un recurso accesible y sencillo de utilizar que cuenta con **voz y entradas para pulsador estándar**. Combinada con el software Director en una Sala Teatro Sense, la botonera es la puerta de entrada a cualquier experiencia, cuento o actividad que quieras diseñar.

Funcionalidad

¿Qué podemos trabajar en la sala de estimulación multisensorial con la botonera?

- Puede controlar uno o varios elementos de la sala, apagarlos o cambiar su modo de funcionamiento (pasivo o interactivo), permitiendo crear actividades y juegos de causa y efecto on uno o varios estímulos.
- ¡Habla! La botonera Sense indica el modo de funcionamiento en el que se encuentra, ofrece realimentación del color pulsado y proporciona instrucciones por voz para las actividades.

- Es la clave para diseñar actividades participativas dentro de tu sala sensorial gracias a los distintos juegos y modos que integra: memoria, espera el color, momentáneo...
- ¡Es sensible al sonido! Con la botonera Sense podrás interactuar con cualquier efecto Sense a través de tu propia voz, música, palmadas o soplos.
- Es accesible, ya que cuenta con 8 entradas jack para conectar pulsadores externos estándar. Esto no solo permite un acceso adaptado a la movilidad de cualquier usuario, sino que también ofrece la oportunidad de crear actividades grupales para los distintos modos de juego. Además, la botonera es muy ligera y portátil, por lo que puede colocarse donde se necesite.



Salas de estimulación multisensorial Eneso Sense

Este producto es una **causa Sense**, lo que significa que te permite controlar cualquiera de los efectos Sense de tu sala sensorial como el [tubo de burbujas](#), la [fuente de fibra óptica](#), o la [piscina de bolas interactiva](#).

Dependiendo del equipamiento de tu sala, podrás utilizar la botonera para realizar actividades de causa y efecto, controlar otros elementos, o incluso participar en cuentos interactivos que incluyan proyecciones de vídeo, sonido y vibración.

- En la [Sala Lite Sense](#), podrás utilizar la botonera para interactuar [tubo de burbujas](#) y la [fuente de fibra óptica](#).
- En la [Sala Classic Sense](#) podrás utilizar la botonera, además, con la [piscina de bolas interactiva](#).
- En la [Sala Teatro Sense](#) podrás diseñar **experiencias inmersivas** totalmente personalizadas a través del software Eneso Director. Por ejemplo, puedes hacer que al pulsar uno de los botones de la botonera Sense toda la sala te transporte al fondo del océano o una cálida playa tropical, te permita experimentar el vuelo de un pájaro o te narre un cuento sensorial en el que tú determines qué ocurre a continuación. ¡Tú decides!



[Manual de usuario](#)



Eneso Tecnología de Adaptación S.L. · (+34) 951 137 145 · www.eneso.es