

Cascada de fibra óptica Sense

Ref.: 002131



La cascada de fibra óptica Sense organiza una mazo de 200 fibras de 3m de longitud en forma de cortina, consiguiendo un efecto visual diferente y muy llamativo. Este formato es ideal además para sentarse junto a la pared en una silla de ruedas, un pedestal o un puff y dejar sentir el peso de la fibra al dejarlo caer sobre los hombros.

La fibra óptica es uno de los recursos más utilizados en cualquier sala sensorial. Este elemento emite puntos de luz de color a lo largo de toda su longitud, pero es totalmente segura ya que por ella no circula electricidad. La fibra puede doblarse, morderse o incluso mojarse sin ningún riesgo.

Funcionalidad

¿Qué podemos trabajar en la sala de estimulación multisensorial con la cascada de fibra óptica?

- La cascada de fibra óptica es perfecta para utilizarla sentado sobre un puff, una silla de ruedas o un [sillón vibroacústico](#) y realizar una actividad de "ducha seca". La sensación propioceptiva al dejar caer el peso de la fibra sobre los hombros produce un efecto relajante, y es una posición privilegiada desde la que observar los cambios de color.
 - Es una fuente de estimulación visual muy llamativa que cubre una gran superficie. Dependiendo del equipamiento de tu sala, podrás trabajar con transiciones de color de forma pasiva o interactiva.
 - Puedes utilizar unas cuantas fibras para realizar un masaje suave, siguiendo los límites del cuerpo.
-



Salas de estimulación multisensorial Eneso Sense

Este producto es un **efecto Sense**, lo que significa que puedes controlarlo a través de uno o varios de nuestros productos de causa Sense, incluyendo el [dado](#) o la [botonera](#).

Además, si instalas una [Sala Teatro Sense](#) podrás diseñar **experiencias inmersivas** totalmente personalizadas a través del software Eneso Director. Por ejemplo, puedes hacer que al pulsar la botonera en un determinado color toda la sala te transporte al fondo del océano o una cálida playa tropical, te permita experimentar el vuelo de un pájaro o te narre un cuento sensorial en el que tú determines qué ocurre a continuación. ¡Tú decides!

Lista para empezar a trabajar

Este es un producto completo, listo para utilizar de forma pasiva. Si no incorporas ninguna causa Sense más, como la botonera o el dado, la cascada cambiará de color de forma autónoma, pasando por una secuencia de colores de forma suave y cíclica. Es la mejor forma para familiarizarse con este elemento, evaluar el perfil sensorial del usuario o trabajar de forma no directiva.

Gracias a esta tecnología **podrás ir ampliando tu sala a tu ritmo**, contando con un espacio funcional y versátil desde el primer día. Si en el futuro decides incorporar una causa, o combinarla con otros efectos Sense, estos se enlazarán de forma inalámbrica y podrás configurarlos como quieras para crear la experiencia que necesites.



[Manual de usuario](#)

